

Womanikin

Toolkit



Mayo 2019

Introducción al Toolkit.

El Toolkit de Womanikin permite a todos aquellos que lo deseen construir su propio accesorio Womanikin RCP, utilizando un patrón de diseño simple y con materiales de fácil acceso.

Y es que cuanto más podamos practicar RCP sobre un torso femenino más vamos a poder normalizar la práctica de RCP en mujeres que lo necesiten en peligro de vida.



Compatibilidad del Womanikin

Para poder practicar RCP con el Womanikin, primero necesitas un modelo "little Anne", manufacturado por Laerdal. En caso de necesitar comprar uno puedes adquirir un "Little Anne" [aquí](#).



Materiales de fabricación



TELA DE NEOPRENO

Tela de neopreno, también llamada scuba skin. Es de la familia de sintéticos de goma comúnmente usada para trajes de agua. Este material permite un calce ajustado en los maniqués universales de RCP y al mismo tiempo mantiene flexibilidad y durabilidad. La tela de neopreno es de fácil acceso y se consigue en la mayoría de los locales textiles.



CIERRE RESISTENTE


Cualquier cierre puede ser utilizado, pero para mayor durabilidad recomendamos que sea uno de metal con la parte de tela de un color parecido al neopreno elegido.



PRÓTESIS DE SILICO-


Las prótesis mamarias de silicona tienen un gran parecido con los pechos naturales, y pueden ser fácilmente insertadas en el diseño del patrón. Recomendamos usar un tamaño de 500gm con forma de gota.

Patrón de diseño

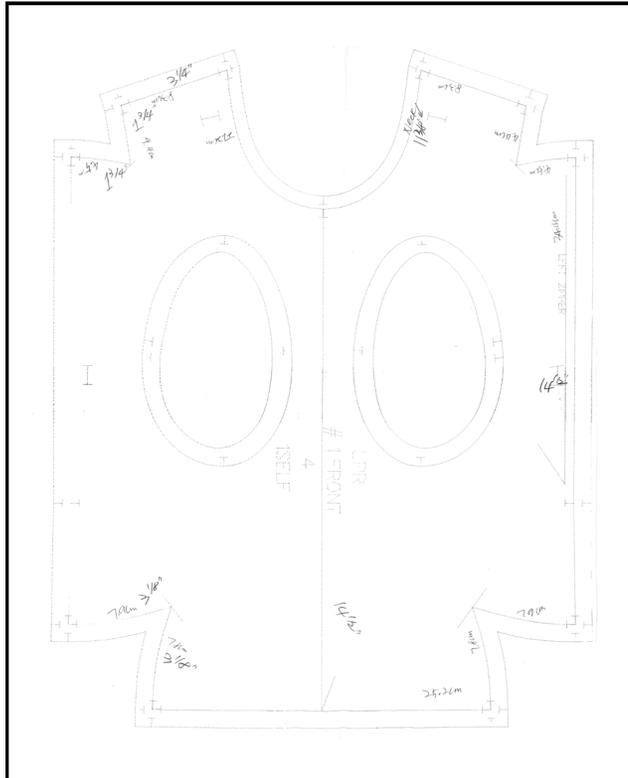


Womanikin

Construction Pattern — Front

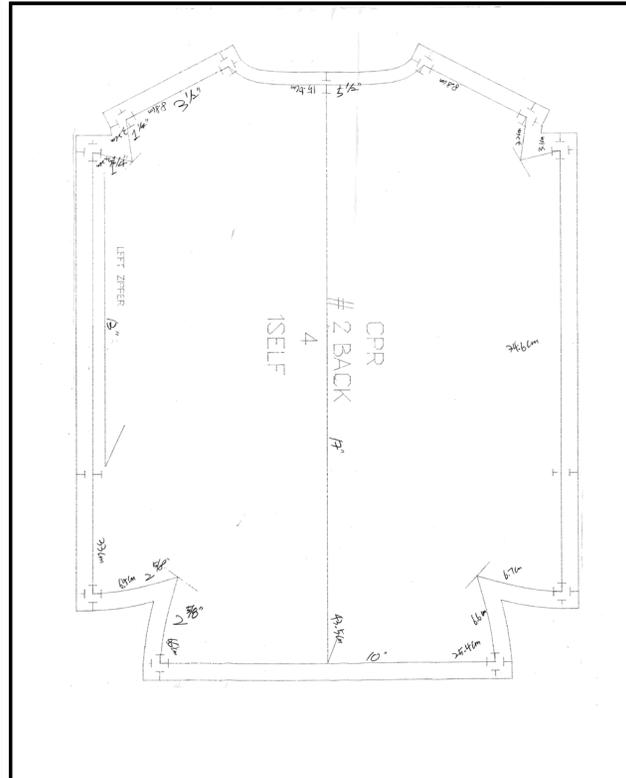

Womanikin

Construction Pattern — Back

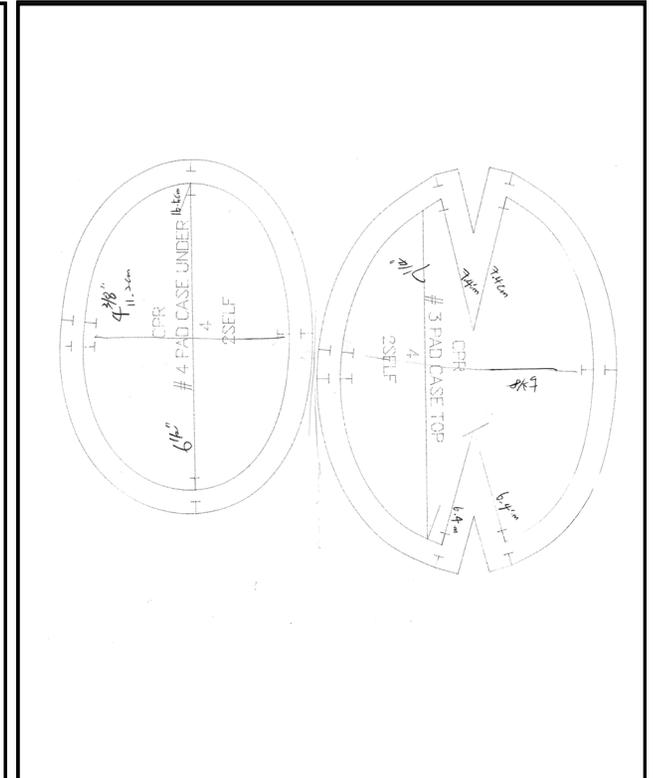

Womanikin

Construction Pattern — Breast Case

Para descargar el patrón en tamaño real [clickear aquí](#)

Womanikin

Una vez adquiridos todos los materiales, construir el accesorio con una costurera siguiendo el patrón proveído. El Womanikin se desliza fácilmente en el maniquí de RCP y debería quedar en el lugar correcto para que los aprendices practiquen sobre él en cualquier clase de entrenamiento de RCP.



Womanikin

Gracias

Por preguntas o sugerencias, contactarse a: info@womanikin.org